

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE&WHITE ALIGNER WHITENING PEN

-
Dé oplossing om tanden
te bleken terwijl uw patiënt
een aligner draagt.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE&WHITE ALIGNER WHITENING PEN

Start uw patiënt binnenkort met een aligner behandeling? Combineer die dan met de Aligner Whitening Pen. Uw patiënt corrigeert de stand van de gebitselementen en ze worden meteen witter. Twee behandelingen in één? Ideaal.

Hoe werkt het?

De magie van de Aligner Whitening Pen zit in de geavanceerde HPS-technologie. Deze maakt gebruik van zuivere waterstofperoxide in een gel op waterbasis, die veilig en effectief is voor gebruik met aligners. Zodra de gel in contact komt met de tanden en speeksel, wordt het waterstofperoxide afgebroken tot zuurstof, water en radicalen. Deze vrije radicalen verwijderen verkleuringen door de chemische verbindingen die dit veroorzaken te elimineren. Het resultaat? Wittere tanden, elke dag een beetje meer.

Voordelen op een rijtje

- **Eenvoudig in gebruik:** Dankzij de penvorm kan uw patiënt de gel nauwkeurig aanbrengen op de te bleken tanden.
- **Tandvriendelijk:** De gel bevat minder dan 3% waterstofperoxide, waardoor deze veilig is voor regelmatig gebruik.
- **Antibacterieel:** Het waterstofperoxide voorkomt opbouw van plaque en biofilm gedurende het dragen van de aligner.
- **Multitasking:** Combineer de alignerbehandeling met een professionele bleekbehandeling.
- **Flexibel:** De gel kan 20 minuten tot maximaal 2 uur per dag gebruikt worden, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de patiënt.
- **Geen stoeltijd:** De patiënt voert de bleekbehandeling zelf thuis uit.
- **Bewaren:** De gel kan op kamertemperatuur bewaard worden.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX

ZYBW238NL.00